




1 EN | If applicable, install the display controller in your computer.
 FR | Si nécessaire, installez la carte graphique dans l'ordinateur.
 DE | Falls nötig, bauen Sie die Grafikkarte in Ihren Computer ein.
 ES | Si procede, instale la tabla gráfica en su ordenador.
 IT | Se necessario, installare la scheda video nel vostro computer.
 ZHsi | 如果需要，请在电脑中安装图形卡。
 ZHtr | 如適用，在電腦中安裝顯示卡。
 Ar | إن وجدت، قم بتثبيت وحدة التحكم بالعرض في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

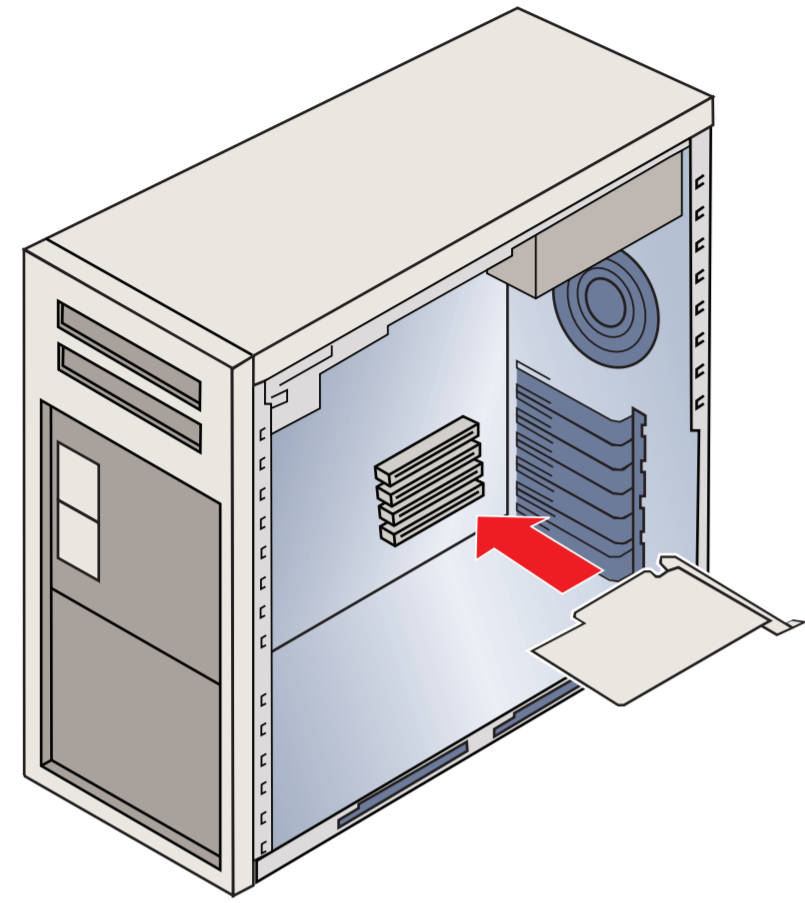


2 EN | Unlock the height-positioning system and adjust your display's position as desired.
 FR | Déverrouillez le système de positionnement en hauteur et ajustez la position de votre écran.
 DE | Entriegeln Sie das Höhenverstellungssystem und passen Sie die Position Ihres Monitors wie gewünscht an.
 ES | Libere el bloqueo de desplazamiento de altura y ajuste su monitor a la posición deseada.
 IT | Sbloccare il sistema di regolazione dell'altezza e regolare la posizione del monitor come desiderato.
 ZHsi | 解除高度锁定后，请用户自行调整喜好的角度与位置。
 ZHtr | 解除高度鎖定後，請用戶自行調整喜好的角度與位置。
 Ar | قم بفتح نظام تحديد المواقع واضبط موضع العرض الخاص بك كما تريد.

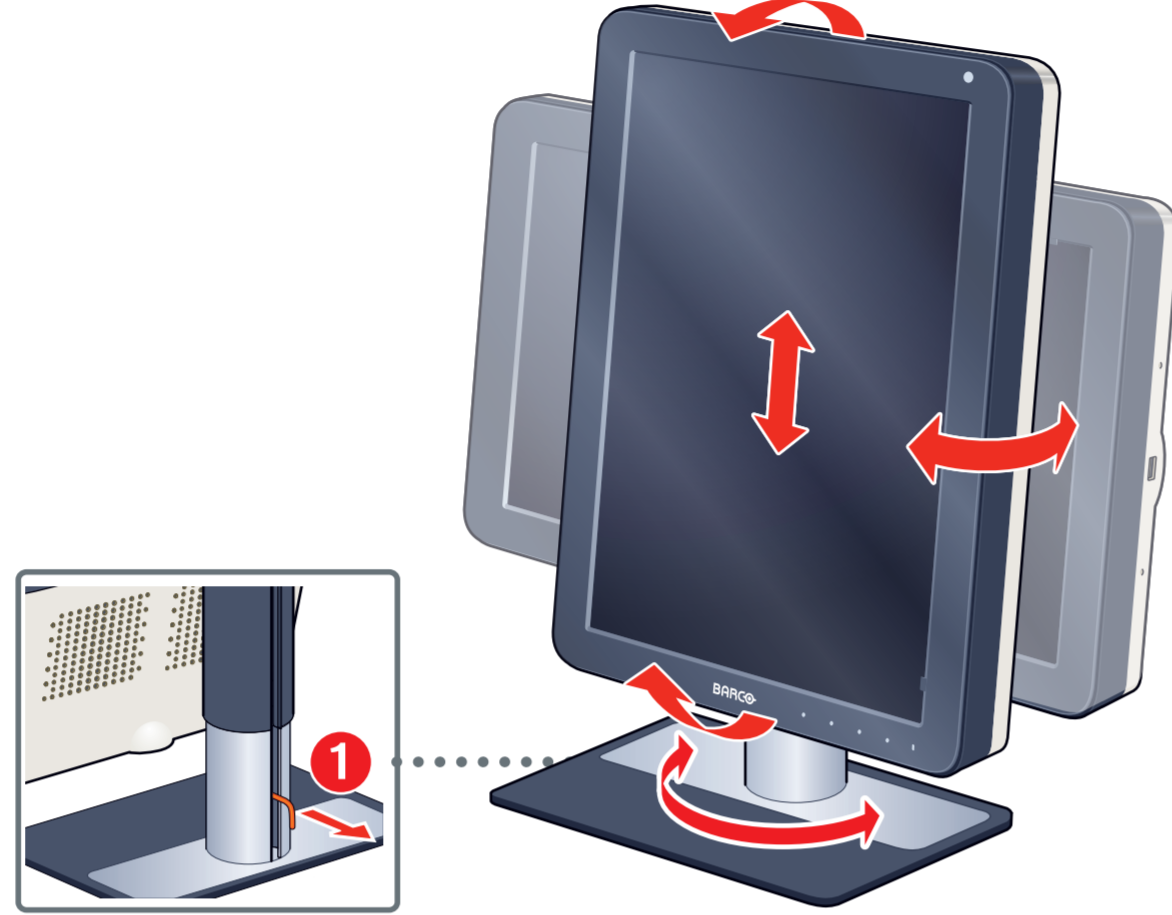


3 EN | Remove the connector compartment cover.
 FR | Retirez le couvercle des connecteurs.
 DE | Entfernen Sie die Schnittstellenabdeckungen.
 ES | Quite la tapa del compartimento de conexiones.
 IT | Rimuovere il coperchio dei connettori.
 ZHsi | 打开机器背后的连接线盖板。
 ZHtr | 打開機器背後的連接線蓋板。
 Ar | أزل غطاء الموصل.

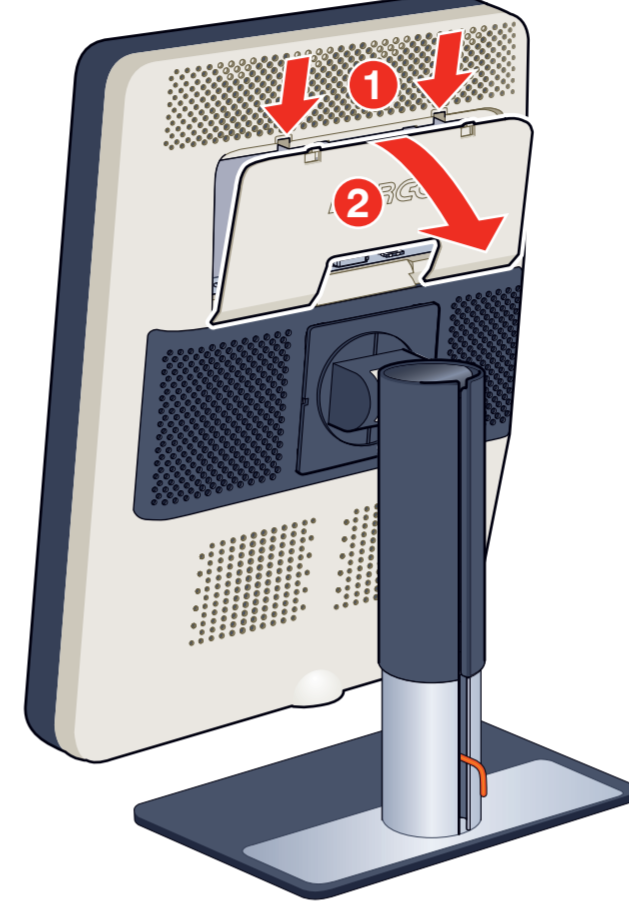


4 EN | Connect the video cable (DisplayPort or DVI) and then connect the power cables.
 FR | Connectez le câble vidéo (DisplayPort ou DVI) et connectez ensuite le câble d'alimentation.
 DE | Schließen Sie das Videokabel (DisplayPort oder DVI) an und verbinden Sie das Stromkabel.
 ES | Conecte el cable de video (Display Port o DVI) y el cable de corriente.
 IT | Collegare il cavo video (DisplayPort o DVI) e quindi il cavo d'alimentazione.
 ZHsi | 请连接信号线(DisplayPort或者DVI)，然后连接电源线。
 ZHtr | 請連接信號線(DisplayPort或者DVI)，然後連接電源線。
 Ar | قم بتوصيل كبل الفيديو (DisplayPort أو DVI) ثم قم بتوصيل كابلات الطاقة.

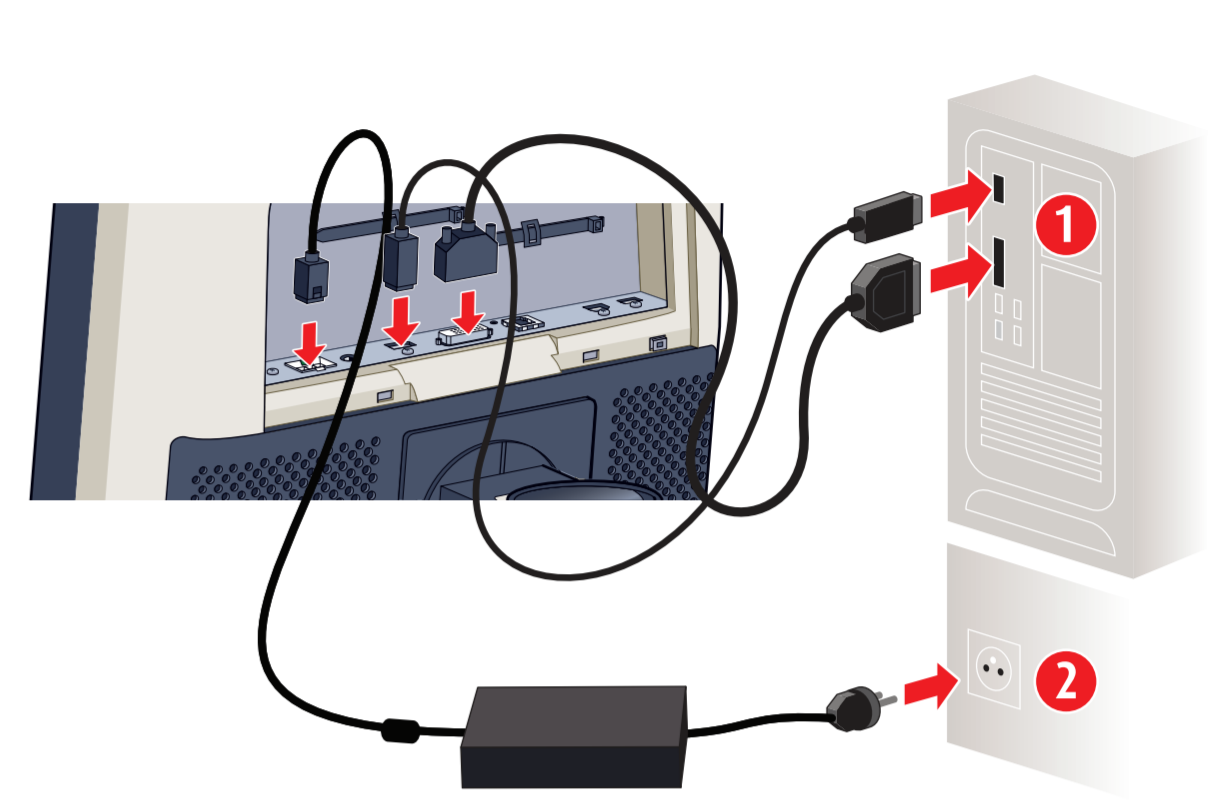


5 EN | Route all cables through the cable channel in the stand of your display.
 FR | Reliez tout les câbles par le conduit pour câbles jusqu'au support de votre écran.
 DE | Verlegen Sie alle Kabel durch den Kabelkanal im Ständer Ihres Monitors.
 ES | Agrupe todos los cables a través de la guía que hay en el interior del soporte de su monitor.
 IT | Convogliare tutti i cavi attraverso il canale apposito del piedistallo del vostro monitor.
 ZHsi | 将所有讯号线绕过脚座后方的线槽。
 ZHtr | 將所有訊号线繞過腳座後方的線槽。
 Ar | قم بتوجيه جميع الكابلات من خلال قناة الكابل في مسند شاشة العرض.

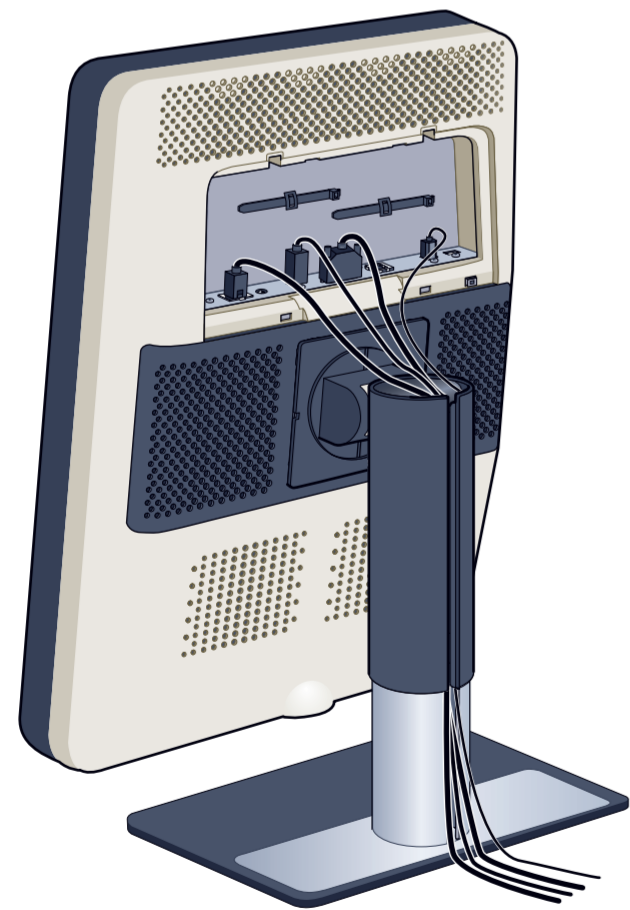

6 EN | Re-attach the connector compartment cover.
 FR | Remettez le couvercle des connecteurs.
 DE | Bringen Sie die Schnittstellenabdeckung wieder an.
 ES | Ponga la tapa del compartimento de conexiones.
 IT | Riposizionare il coperchio dei connettori.
 ZHsi | 合上连接线盖板。
 ZHtr | 合上連接線蓋板。
 Ar | أعد غطاء الموصل.

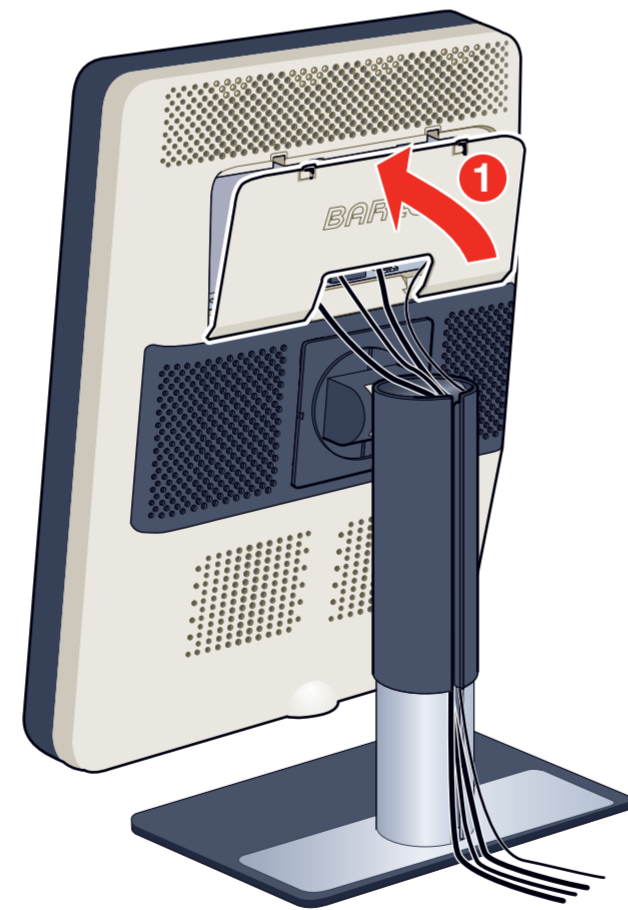

7 EN | Install the software, drivers and documentation on your computer.
 FR | Installez le logiciel, les pilotes et la documentation sur votre ordinateur.
 DE | Installieren Sie die Software, Treiber und Dokumentation auf Ihrem Computer.
 ES | Instale el software, controladores y documentación en su ordenador.
 IT | Installare il software, driver e la documentazione sul vostro computer.
 ZHsi | 安装显示卡驱动程序与影像校正软件。
 ZHtr | 安裝顯示卡驅動軟體與影像校正軟體。
 Ar | ثبت البرنامج وبرامج التشغيل والوثائق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

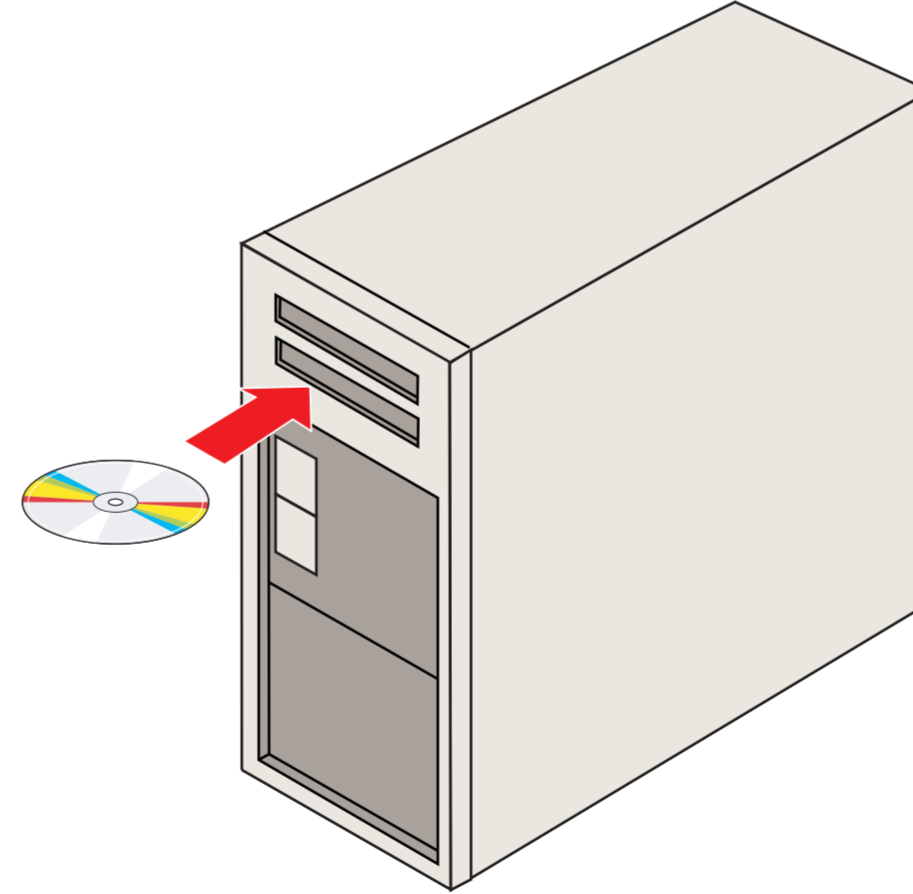

8 EN | Start-up and use MediCal QAWeb Agent.
 FR | Démarrez et utilisez MediCal QAWeb Agent.
 DE | Starten und verwenden Sie den MediCal QAWeb Agent.
 ES | Inicie y utilice MediCal QAWeb Agent.
 IT | Avviare e utilizzare MediCal QAWeb Agent.
 ZHsi | 启动并使用 MediCa1 QAWeb Agent。
 ZHtr | 啓動與使用 MediCal QAWeb Agent。
 Ar | ابدأ باستخدام Medical QAWeb Agent.

MediCal QAWeb

9 EN | **Important:** Enable DPMS & screensaver for optimal display performance throughout the product lifetime.
 FR | **Important:** Activez DPMS et l'écran de veille pour préserver les performances optimales de l'écran tout au long de sa vie utile.
 DE | **Wichtig:** Aktivieren Sie Energiesparautomatik (DPMS) und Bildschirmschoner, um eine optimale Displayperformanz während der Produktlebensdauer zu gewährleisten.
 ES | **Importante:** Habilite el DPMS (opciones de energía) y el salvapantallas para obtener un óptimo funcionamiento de la pantalla a lo largo de la vida útil del producto.
 IT | **Importante:** Abilitare il DPMS e lo screen saver per preservare le prestazioni ottimali dello schermo per tutta la vita del prodotto.
 ZHsi | 重要：请启用DPMS和屏保以便在产品使用期间获得最佳显示性能。
 ZHtr | 重要：請啓用DPMS和螢幕保護程式以便整個產品使用壽命期間表現最佳顯示性能。
 Ar | ملاحظه هامة : تشغيل نظام DPMS و حافظ شاشة التوقف يمكنك من الحصول على أداء افضل واطول لعمر المنتج.

Display Controller Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل.

Coronis/Nio Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل.

MediCal QAWeb Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل.

Coronis/Nio Quick Install Sheet

Fiche d'installation rapide | Falblatt für Schnellinstallation | Hoja de instalación rápida | Guida rapida all'installazione | 快速安装单 | 快速安裝單 | ثبت الورق بسلاسه.

BARCO

Visibly yours